

# Protections de Barrières de Lit - La paire

## Codes :

Reference: PROBARM



## Description :

Petit modèle : 140 x 35 x 3 cm

Certifiées CE et fabriquées en France, ces protections en mousse s'installent sur les barrières de lit évitant ainsi au patient de se cogner et de passer les membres au travers des barrières ce qui le protège du contact avec le métal.

La fixation rapide et facile aux barrières de lit se fait avec des boucles rapides (25 mm).

La housse amovible en protectlaïse est classée au feu M1.

### FIXATION

Boucles de 25 mm

Composition : Jersey polyester enduit de PVC classé au feu M1

Mousse PE

Sangles 100 % polyester

Boucles nylon

### NOTICE D'UTILISATION

Placer les protections à l'intérieur de la barrière, fermeture à glissière en bas contre le matelas.

Fermer les sangles, en les ajustant "tendues" autour des tubes des barrières.

Contrôler si les protections sont bien ajustées aux barrières, sans possibilité de tourner autour.

### CONSEILS D'ENTRETIEN :

Nettoyage par surfaçage avec une chiffonnette à l'eau tiède savonneuse.

Désinfection par surfaçage avec tous produits utilisés en milieu hospitalier.

Lavage des housses seules :

Ne jamais laver les housses avec la mousse (voir recto). Le dispositif médical ci-dessous désigné,

---

appartient à la Classe I et satisfait aux dispositions du décret qui lui est applicable

Made in France. Certifiées CE. Dispositif médical de classe 1. Conforme à la législation REACH.  
Température de lavage : 90°C. Gamme Hospitalière