

CEINTURE ET SANGLE PELVIENNE T1-2-3-4

Codes :

Reference: 0770120



Description :

Gamme AUXILIA : large gamme de produits, conçue pour répondre aux différents types de maintien.

Gamme conçue pour assurer une bonne stabilité, améliorer la sécurité et le confort des utilisateurs de fauteuil roulant ou de repos.

Conseils d'installation :

1. Défaire les boucles et placer la ceinture autour du patient.
2. Passer la sangle pelvienne entre les jambes.
3. Asseoir le patient.
4. Passer la sangle de la ceinture dans la boucle de la sangle de l'entre-jambe.
5. Fixer l'attache rapide à l'arrière du fauteuil.
6. Régler les sangles selon la morphologie du patient.

Limites d'utilisation : Ne convient pas aux personnes très agitées.

Composition :

- Maille grattée sur mousse Polyuréthane avec envers bouclette
- Maille grattée : 100% Polyester
- Mousse : 100% Polyuréthane
- Bouclette : 80% Coton et 20% Polyamide
- Biais : 100% coton
- Sangles : 100% Polypropylène

- Boucles : 100% Acétal

Gamme Auxilia

Ceinture et sangle pelvienne

Garantie : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.

Maintien, Transfert et Mobilité

Entretien :

Fermer les boucles avant le passage en machine.

Avant toute nouvelle utilisation, vérifier l'usure et les éventuels dommages sur les points suivants : tissu, sangle, couture, boucle. Ne pas utiliser un matériel endommagé.

Gamme AUXILIA : large gamme de produits, conçue pour répondre aux différents types de maintien.

Gamme conçue pour assurer une bonne stabilité, améliorer la sécurité et le confort des utilisateurs de

fauteuil roulant ou de repos.

Dimensions (en cm)* Voir schéma

ref : 07.70100 Taille 1 - a10 - b60 - c**190 - d50 - e**115

ref : 07.70110 Taille 2 - a10 - b75 - c**200 - d55 - e**115

ref : 07.70120 Taille 3 - a10 - b85 - c**260 - d55 - e**150

ref : 07.70130 Taille 4 - a10 - b105 - c**290 - d60 - e**150

Merci de préciser votre choix lors de votre commande