

## Appui tibial Moustache ®

### Codes :

Reference: SI21635



### Description :

Le dispositif MOUSTACHE® est une aide technique permettant de faciliter et de sécuriser les transferts par verticalisation aidée en face à face. Placé sous les rotules de l'aidé et verrouillée avec son système d'attaches rapides, MOUSTACHE® facilitera une verticalisation sécurisée en verrouillant (anti abduction et adduction) les jambes de la personne. L'aidant doit positionner son tibia en opposition dans l'encoche prévue à cet effet.

Dans certains cas, pour optimiser la verticalisation et son utilisation, MOUSTACHE® peut être associé avec une ceinture de transfert OLIVIA, positionnée sur l'aidant, et un disque de transfert, type : PEDILETTE, placé sous les pieds de l'aidé.

Dimensions : 44,4 x 23,5 x 9 cm charge maxi : 130 kg

MOUSTACHE® est un appui tibial anti abduction / adduction des jambes. Il permet un maintien axial des jambes. MOUSTACHE® est placé sur les tibias du patient, et peut être verrouillé grâce à la sangle en velours et au système d'accroche rapide. L'aidant met son tibia en opposition dans l'encoche, et procède au lever du patient selon ses gestes habituels.

### COMPOSITION

Mousse de polyéthylène certifiée pour un usage médical classe I.

Sangle velours et finition par accessoire en polyéthylène.

---

## HYGIENE ET ENTRETIEN

Tous les produits de notre gamme se conforment aux protocoles de désinfection hospitalière. Protocole de « nettoyage - désinfection et de compatibilité tissus » mis au point par la société Anios.

## PROCÉDÉ DE LAVAGE :

Pulvérisation d'un détergent désinfectant surfaces hautes de pH neutre et essuyage, Essuyage à l'eau savonneuse. Pas de jet sous pression. Pas de solvants, chlores, bases, acides, eau de javel ou produits abrasifs/corrosifs.

VIDÉO : [cliquez ici](#).

CONDITIONNEMENT : 1 carton contenant :

1 appui tibial MOUSTACHE et sa sangle.  
1 fiche technique

## INDICATIONS :

Manutention manuelle par une tierce personne, entre deux positions assises, d'un sujet présentant une incapacité de verticalisation autonome. Indiqué pour les sujets présentant une faiblesse musculaire modérée des membres inférieurs (force des quadriceps supérieure ou égale à 3/5). Indiqué pour les sujets présentant un déficit de contrôle des mouvements des membres inférieurs lors de la verticalisation (hypertonie en extension des genoux, adduction, abduction de hanche). Indiqué pour les premiers transferts post opératoire des personnes présentant une prothèse de hanche (en association avec un disque pivotant). Il est recommandé d'utiliser le dispositif en association avec une ceinture multiprises placée sur l'aidant (pour les patients ayant une capacité de préhension). Il est recommandé d'utiliser le dispositif en association avec un disque pivotant. Une ceinture ischiaux permettant d'assurer une prise sur le patient peut être associée.

## CONTRE INDICATIONS :

Contre indiqué pour les sujets présentant une hypotonie complète des membres inférieurs ou faiblesse musculaire importante des membres inférieurs (force des quadriceps inférieure à 3/5). Contre indiqué pour les sujets présentant une interdiction d'appui sur au moins un membre inférieur.