

Rampe Modulaire kit 2

Codes :

Reference: 091167329



Description :

Matériau : Plastique

Haut. : $\leq 7,5\text{cm}$

Dim. (L x l) : 51cm x 75cm

Polyvalentes

Légères

Rapides et faciles à installer

pour franchir des seuils mesurant jusqu'à 15cm de haut

Résiste à 1 tonne par $2,5\text{cm}^2$

Pour une installation temporaire ou permanente

Lors du choix d'une rampe, la longueur et donc l'angle d'inclinaison de la rampe dépendent :
de la hauteur du palier,
du type de fauteuil roulant ou de scooter,
du poids du fauteuil roulant ou du scooter avec l'utilisateur,
de la force de l'accompagnateur ou de l'utilisateur.

En règle générale, un dénivelé de 1 sur 12 est recommandé pour les utilisateurs en fauteuil roulant ou scooter. Pour faire monter un fauteuil roulant ou un scooter à vide dans un véhicule, une pente plus importante peut être utilisée mais elle ne doit pas être supérieure à 1 sur 3. En outre, il est important de consulter le guide d'utilisation du véhicule pour connaître le bon degré d'inclinaison et d'orientation avant d'utiliser la rampe. Ne jamais dépasser les valeurs recommandées.

