

Broyeur de comprimés électrique Severo

PRIX EN
BAISSE



Codes :

Reference: NA00030



Description :

Autonomie : 500 cycles de broyage (≈3 jours d'utilisation en continu)

Alimentation par batterie rechargeable (chargeur fourni)

Temps de chargement : 2 heures

Niveau sonore : 52 db

Poids de l'appareil : 1.5 kg

Dimensions : L. 80 x P. 70 x H. 217 mm

Garantie : 2 ans pour l'appareil et 1 an pour la batterie

Simple, efficace et robuste

Quasi silencieux

Broyage sans effort ni risque de TMS

Facilement nettoyable

Léger et portable

UTILISATION :

- 1- Placez les médicaments dans le gobelet sans dépasser la première ligne.
- 2- Placez la tête de broyage sur le gobelet.
- 3- Ouvrez le couvercle du Severo en appuyant sur le bouton métallique.
- 4- Placez le gobelet avec la tête de broyage sur le plateau.
- 5- Fermez le couvercle du Severo en exerçant une légère pression.
- 6- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour que le processus de broyage commence. La LED du bouton passe au vert une fois le broyage terminé.
- 7- Ouvrez le couvercle puis soulevez la tête de broyage. Les médicaments sont réduits en fine

poudre et peuvent être mélangés aux repas des patients.

8- Avant de lancer un nouveau broyage, essuyez la tête de broyage avec une lingette sèche à usage unique pour éviter la contamination croisée.

DESIGNATION :

Broyeur de comprimés Severo® NA00030

Lot de 2100 gobelets à usage unique NA00014.01

Lot de 2000 couvercles à usage unique NA00015.01

Pour éviter les troubles musculo-squelettiques dûs au broyage manuel, le broyeur électrique Severo® a été développé en collaboration avec des professionnels de santé. Ce broyeur, déjà approuvé par de nombreux instituts, permet de réduire en une fine poudre les comprimés les plus durs, en moins de 8 secondes.